

INSTRUKTIONER FÖR PORTABLE II MICROMOTOR

Specifikationer :

Kraftkälla.....	Förseglat Ni-MH 14,4V / 880mAh batteri
Motorhastighet.....	8,000 - 25,000 rpm Max.
Märkström.....	800 mA
Batteriladdning.....	500 gånger eller mer
Laddningstid.....	5~6 hours
Inmatning.....	DC15V
Produktion.....	DC5V~16V



installationer :

- Anslut handstycket och motorn tillsammans.
- Sätt in 3,5-jacks manplugg till kvinnornas jackkontakt.

Operationer :

- Slå på kontrollen och indikeringslampan tänds..
- Genom att vrida på / av-knappen, är regulatorns hastighet inställbar från 8 000 till 25 000 varv per minut.
- R / F-omkopplaren är R för omvänd och F för framåt..

försiktighetsåtgärder :

- Undvik att använda olja vid smörjning av handstycket och motorn.
- Även en mycket lätt olja kan skada Micromotor.
- Håll Micromotorn ren med mjuk trasa fuktad med varmt vatten eller alkohollösning.

Safety :

- Av säkerhetsskäl är batteriet inte 100% fulladdat före leverans.
- Det är tillrådligt att ladda batteriet när den finns i lager i över 3 månader.

Varning :

- Om regulatorm har blivit lagrad i över 3 månader, var vänlig ladda om för att undvika låg batterilivslängd.

