

Rengöring: Omedelbart efter varje användning bör keramik borren sköljas med rikligt med rinnande varmt vatten. Ta försiktigt bort alla spår av smuts, med hjälp av nylonborste, bomull eller spraya tryckluft. Använd aldrig stålull eller annat slipmaterial för detta ändamål.

Desinfektion: Keramik borren måste desinficeras med specifika neutrala lösningar (pH 7), Viktigt att koncentrationer och exponeringstid följer tillverkarens anvisningar. Borren måste sköljas, torkas och kontrolleras för att fastställa att inga skador finns innan sterilisering . Borren kan rengöras och desinficeras i ultraljudsbad.

Sterilisering: Keramik borren kan steriliseras i autoklav (max 134 grader), med torrsterilisering (max 180 grader). Om du använder autoklav eller torrsterilisering är det viktigt att inte överskrida den föreslagna steriliseringstemperaturen, då kan keramik borren mörkna eller bli svagare. För autoklav sterilisering rekommenderar vi starkt att du använder endast destillerat vatten. Efter sterilisering låt svalna och torka helt.