

### Bruksanvisning för handtaget

Sätta och ändra borrhå (se även ritning nedan)

Se till att motorn är avstängd innan du sätter i eller ändrar borrhå. Motorn får endast vara påslagen när borrhå har säkrats. Om detta inte sker, kommer en automatsäkring reagera och handtaget fungerar inte.

Genom att vrida den räfflade delen till höger, öppnas chucken så att borrhå kan sättas i. (Säkerställt att skaftet på borrhå är ren och torr innan du sätter i det.) Genom att vrida det räfflade delen tillbaka till vänster, stänger chucken och borrhå är säkrad.

Innan du sätter i borrhå ska en av gummihätta / dammskydd sättas på borrhåskaftet. Borrhå fästes sedan såsom beskrivits ovan. Avståndet mellan gummi/dammskyddet och handenheten ska vara ungefär en nagels tjocklek. Borrhå måste kunna rotera fritt utan dammhätta rör vid handenheten. Detta för att förhindra att damm och fukt kommer in i kullagren.

- 1) Tappa inte handtaget.
- 2) Borrhå med en diameter på mer än 8 mm får inte användas.
- 3) Använd inte oljor eller fett i handtaget och enheten.
- 4) Använd inte tryckluft för att rengöra handtaget eftersom detta kan blåsa smuts i handtaget.
- 5) Orthofex rekommenderar att handtaget och enhet servas en gång om året.
- 6) Använd alltid dammskydd/hätta för att förhindra att få in fukt i kullagren.

Garanti gäller INTE om du inte följer dessa regler